

# TIGGES/T-FLEX Orthesensystem

## Wirbelsäulen-Orthesen ohne Mobilisierungsfunktion

Für spezielle Indikationen, bei denen eine  
therapeutisch korrekte **Abschulung nicht** erforderlich ist

### TIGGES Lumbalstützorthese *basic*

Lumbalstützorthese mit  
stabilisierender Rückenpelotte  
ohne Mobilisierungsfunktion



### T-FLEX B *basic* Überbrückungsorthese

Überbrückungsorthese mit  
höhenverstellbarem Kunststoffrahmen  
ohne Mobilisierungsfunktion

### T-FLEX *basic* Flexionsorthese

Flexionsorthese mit höhenverstellbarem Kunststoff-  
rahmen und in der Flexion einstellbarer Bauchpelotte  
ohne Mobilisierungsfunktion



**TIGGES**

Innovative Wirbelsäulen-Therapie

OZO-Zours GmbH  
D-45525 Hattingen  
Am Beul 10

Telefon (0 23 24) 5 94 97-0  
Telefax (0 23 24) 5 94 97-29  
E-Mail [tigges@zours.de](mailto:tigges@zours.de)  
Internet [www.t-flex.de](http://www.t-flex.de)

# TIGGES-Lumbalstützorthese *basic*

## Indikationen

Spezielle Indikationen für eine Lumbalstützorthese, bei denen eine therapeutisch korrekte

Abschulung nicht erforderlich ist (z.B. Hyperlordose mit erheblichem Hängeleib).

## Wirkungsweise

Die **TIGGES**-Lumbalstützorthese *basic* erzielt eine **entlordosierende Position** und einen abdominalen Druck durch die im Rücken eingesetzte **Delordosierungspelotte**. Der Druck auf die erkrankte Bandscheibe wird **reduziert**

und die betroffenen **Bewegungssegmente** werden **entlastet**. Die Bewegung ist stark eingeschränkt, Rotationen sind nur noch bedingt möglich.

## Rezeptur: TIGGES-Lumbalstützorthese *basic*

Pos.Nr: 23.14.04.0003

# T-FLEX B *basic* Überbrückungsorthese

## Indikationen

Spezielle Indikationen für eine Überbrückungsorthese, bei denen eine therapeutisch korrekte

Abschulung nicht erforderlich ist (z.B. bei metastasierenden Erkrankungen der Wirbelsäule).

## Wirkungsweise

Die **T-FLEX B *basic*** Überbrückungsorthese erzielt eine Bewegungseinschränkung in **entlordosierender Position** im Bereich der Lendenwirbelsäule durch den im Rücken eingesetzten thermoplastisch verformbaren und in der Höhe

**verstellbaren** Kunststoffrahmen. Die Rotation ist deutlich **eingeschränkt**. Durch das verwendete elastische Material bleibt der Patient jedoch „teilaktiv“.

## Rezeptur: T-FLEX B *basic*

Pos.Nr: 23.14.04.1004

# T-FLEX *basic* Flexionsorthese

## Indikationen

Spezielle Indikationen für eine Flexionsorthese, bei denen eine therapeutisch korrekte Abschulung nicht erforderlich ist (z.B. bei meta-

stasierenden Erkrankungen der Wirbelsäule, insbesondere Plasmozytome).

## Wirkungsweise

Die **T-FLEX *basic*** Flexionsorthese erzielt eine **Entlordosierung** durch einen **höhenverstellbaren** Kunststoffrahmen mit starren Metallschienen und eine Bauchpelotte, die **Rotation** ist **deutlich eingeschränkt**. Der intra-abdominale Druck wird erhöht, die Brustatmung

wird forciert. Die **Wirbelsäule** wird durch die in der Inspirationsphase entstehende Distraction **entlastet**. Der intradiskale Druck fällt ab, der Spinalkanal und die Foramina werden erweitert, dadurch werden die neuronalen Strukturen entlastet.

## Rezeptur: T-FLEX *basic*

Pos.Nr: 23.14.04.2002

**TIGGES**

Innovative Wirbelsäulen-Therapie