

# TIGGES GenuSet 1



Kniebandage  
zur Weichteilkompression



TIGGES GenuSet 1

HMV-Nummer  
05.04.01.0007

**TIGGES** innovative Modul-Orthesen )



## Gebrauchs-Information

# TIGGES GenuSet 1

## Gebrauchs-Information

Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen mit der **TIGGES GenuSet 1** ein bewährtes Markenprodukt verordnet.

Wir wünschen Ihnen, dass diese Kniebandage Ihren Heilungsprozess bestmöglich unterstützen wird. Hierzu ist es sehr wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung **vollständig** und **sorgfältig durchlesen!** Insbesondere das korrekte Tragen der **TIGGES GenuSet 1** trägt entscheidend zur Erzielung des gewünschten Effektes bei.

### Zweckbestimmung

Zweckbestimmung des Produkts ist die Weichteilkompression oder elastische Stützung und Druckentlastung an Band- oder Faszienansätzen.

### Leistungsmerkmale

Die Bandage ist geeignet für Patienten/innen ab 12 Jahren und einer Körpergröße von 140 bis 210 cm mit Schädigung im Kniebereich.

## Anlegen der TIGGES GenuSet 1

Steigen Sie mit dem Fuß durch die Bandage und ziehen diese hoch. Die runde Formung auf der vorderen Seite sollte die Kniescheibe erfassen. Achten Sie auf die richtige Zuordnung von Ober- und Unterschenkel sowie vorne/hinten.

Bei dem **ersten Anlegen** der Bandage muss **durch einen Orthopädie-Techniker** der Sitz überprüft und ggf. korrigiert werden! Das richtige Anlegen sollte vom Techniker mit Ihnen geübt werden.

## Ablegen der TIGGES GenuSet 1

Streifen Sie die Bandage zum Fuß hin vom Bein ab.

## Informationen für das Fachpersonal

### Maßnahmen der TIGGES GenuSet 1

1. Messen Sie den Oberschenkel- und Unterschenkelumfang jeweils 14 cm oberhalb bzw. 12 cm unterhalb der Kniemitte. Ziehen Sie hierbei das Bandmaß mit leichtem Druck an.
2. Das Größenschema finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsinformation.
3. Nehmen Sie die Bandage in den gemessenen Größen und vergleichen Sie die Passgenauigkeit. Sollte die Bandage zu eng/zu locker sitzen, wählen Sie eine größere/kleinere Größe.

### Anlegen der TIGGES GenuSet 1






Geben Sie Ihrem Patienten eine Einweisung zum Anlegen und zur korrekten Nutzung der Bandage.

Das erste Anlegen der Bandage muss immer durch geschultes Fachpersonal erfolgen! Die Bandage so auf dem Bein ausrichten, dass der Silikonring die Kniescheibe bündig umfasst. Geben Sie eine Einweisung in den weiteren Gebrauch der Bandage entsprechend der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsinformation dem Patienten immer mitgeben!

## Bitte zusätzlich beachten

- Die **TIGGES GenuSet 1** sollte nur **unter ärztlicher Anleitung** getragen werden. Hierbei sind die Angaben dieser Gebrauchsinformation unbedingt zu beachten.
- Die **TIGGES GenuSet 1** ist nur zur einmaligen Versorgung für einen Patienten vorgesehen. Bei Nichtbeachtung kann es z. B. zu Materialbruch und/oder Infektionen kommen.
- Eine Entsorgung der **TIGGES GenuSet 1** kann problemlos über den Hausmüll vorgenommen werden.
- Sollten Sie **außergewöhnliche Veränderungen an sich (z. B. Zunahme der Beschwerden)** feststellen, suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.

## Pflegeanleitung

DEU	ENG	ESP	ITA
 Schonwäsche	Machine wash permanent press	Ciclo suave	Ciclo delicato
 Chlorbleiche nicht möglich	Do not bleach	No blanquear	Non candeggiabile
 Nicht bügeln	Do not iron	No planchar	Non stirare
 Keine chem. Reinigung möglich	Do not dry clean	No lavar en seco	Non lavare a secco
 Trocknen im Trommelrockner nicht möglich	Do not tumble dry	No usar máquina secadora	Non asciugabile in asciugatrice

**Die Kniebandage keinesfalls direkter Hitze aussetzen!**  
(z. B. Heizung, Sonneneinstrahlung).

Körperschweiß, kosmetische Fette und Öle beeinträchtigen die Lebensdauer, insbesondere der elastischen Gewebe, deshalb wird gelegentliches Waschen empfohlen:

- die Bandage nur mit Handwäsche und in lauwarmem Wasser (ca. 30°C) waschen
- nur Feinwaschmittel verwenden
- nicht reiben oder bürsten
- nach dem Wäschebad gut ausspülen
- flach auf Frottiertuch auslegen, einrollen und ausdrücken – nicht wringen
- beim Trocknen Sonneneinwirkung, Ofen- oder Heizungsnahe vermeiden
- **keinesfalls im Heißlufttrockner trocknen**

## Material










Folgende Materialien werden verwendet:

Bandage	Polyamid, Elasthan, Viskose
---------	-----------------------------

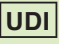Die elastischen Materialien der Bandage enthalten Latex, das zu einer Sensibilisierung der Haut und/oder allergischen Reaktionen führen kann. Bitte konsultieren Sie gegebenenfalls Ihren Arzt.

Die eingesetzten Kunststoff- und Textilmaterialien unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess und sollten daher i. d. R. nicht länger als fünf Jahre (nach Herstellungsdatum) genutzt werden.

# Symbole

	DEU	ENG	ESP	ITA
	Hersteller	Manufacturer	Fabricante	Fabbricante
	Ist ein Medizinprodukt	Medical device	Producto sanitario	Dispositivo medico
	Unique Device Identification	Unique Device Identification	Unique Device Identification	Unique Device Identification
	Herstellerdatum	Date of manufacture	Fecha de fabricación	Data di fabbricazione
	Verwendbar bis	Use by date	Fecha de caducidad	Utilizzare entro la data indicata
	Chargen-kennzeichnung	Batch code	Código de lote	Codice di lotto
	Vor Nässe schützen	Keep dry	Manténgase seco	Conservare a secco
	Vor Lichteinstrahlung schützen	Keep away from sunlight	Manténgase fuera de la luz del sol	Conservare al riparo dalla luce solare
	Latex-Bestandteil	Item contains or has a presence of natural rubber latex	Contiene látex	Contiene lattice

## Allgemeiner Hinweis

Sofern es im unwahrscheinlichen Fall von gravierenden, nicht vorhersehbaren Produktmängeln zu schwerwiegenden Vorkommnissen wie z. B. Tod oder vorübergehender/dauerhafter Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten bzw. Anwenders oder zu einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Gesundheit kommt, sind der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaats umgehend zu informieren.

## Indikationen

- Chondroпатия/-malacia patellae
- postoperative Schwellung
- Leichte Arthrose im Patella-Kompartiment; CM-Grad I
- Patelladysplasie
- Patellalateralisation
- Patellasehnenreizzustand
- Patellaspitzensyndrom
- Akuter Weichteilreizzustand
- Chronischer Weichteilreizzustand
- Posttraumatischer Weichteilreizzustand

## Nebenwirkungen


Unter der Voraussetzung einer sachgemäßen Anwendung (richtiges Anlegen) sind Nebenwirkungen bis jetzt nicht bekannt. Zu fest anliegende Bandagen oder Orthesen können prinzipiell zu lokalen Druckerscheinungen führen oder auch in seltenen Fällen Blutgefäße oder Nerven einengen.

## Kontraindikationen (relativ)

Überempfindlichkeiten sind bis jetzt nicht bekannt.


Bei nachfolgenden Krankheitsbildern kann das Anlegen und Tragen eines solchen Hilfsmittels kontraindiziert sein:

1. Hauterkrankungen/-verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen. Ebenso bei aufgeworfenen Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung.
2. Empfindungsstörungen.
3. Stärkere Einschränkung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit (Gefahr der Blutdrucksteigerung bei angelegtem Hilfsmittel und stärkerer körperlicher Leistung).

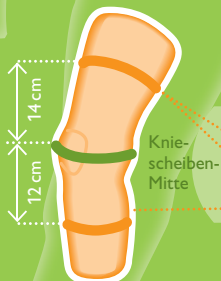

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
• Umfang in cm	41 – 44	44 – 47	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59
• Umfang in cm, V-Form	–	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59	59 – 62
• Umfang in cm	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr **Sanitätshaus**:

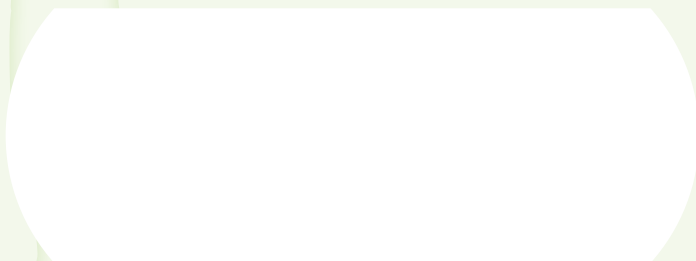

**TIGGES** innovative Modul-Orthesen



TIGGES-Zours GmbH  
D-45525 Hattingen  
Am Beul 10

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0  
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29  
E-Mail [tigges@zours.de](mailto:tigges@zours.de)  
Internet [www.t-flex.de](http://www.t-flex.de)



Bitte lesen Sie die  
Datenschutzhinweise  
auf unserer Website  
[www.zours.de](http://www.zours.de)



00223/123